



# HKG *epi* THERAPEUTICS Ltd.

*Harnessing the epigenome*

## EpiAging

### 唾液採集套裝

#### 使用說明

#### 唾液收集前

採集唾液前 30 分鐘不能飲食，吃口香糖，刷牙，使用漱口水或吸煙

1. 在唾液收集前，放鬆臉頰，用手指輕輕按摩 15-30 秒，有助於產生更多的唾液。
2. 完成唾液收集通常需要 2-5 分鐘。

#### 使用程序

1. 將唾液吐入連接到收集管的漏斗中，直到唾液量達到收集管的 5 毫升線。

備註：不含氣泡的唾液必須達到 5 毫升線。 唾液收集量不足可能令測試失敗。

2. 小心地擰下漏斗，以防止收集的唾液從管中溢出。
3. 將蓋子管中的液體轉移到唾液收集管中。倒置搖動唾液收集管 10-15 次，以確保唾液和穩定緩衝液完全混合。
4. 最後，將樣本直接放在密封袋內。
5. 請保留條形碼貼紙用於獲取測試結果。